



# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

## серии ЛЮКС

**Этикетка**  
**АВЕ 303.000.000.1 ЭТ**

Сертификат соответствия  
№TC RU C-RU.AL16.B.06987 от 29.09.2015

**Изготовитель:**

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)  
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20  
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 [feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)  
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23  
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

<b>ЛЮКС</b>	<b>2.1</b>
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1** Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного серии ЛЮКС (далее – **ЛЮКС**), ТУ 3461-050-52331864-2015, ТН ВЭД 9405 40 990 8. **ЛЮКС** предназначен для локального освещения рабочей зоны при совместном использовании его с шлифмоторами\*, боксами\*, вытяжками\*, разрезными\*, сверлильными\*, фрезерными устройствами\*.

**1.2 Особенности:** гибкий кронштейн, сверхъяркий светодиод, источник питания, выключатель, два способа крепления.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°С
- влажность при 25°С, не более .....80%

### 1.4 Основные технические характеристики

- электропитание.....~220/230В 50/60Гц 50МА
- мощность светодиода (1) ..... 3,6 Вт
- длина гнущегося штатива (2) ..... 320 мм
- масса, не более ..... 0,3 кг

### 1.5 Комплектность

	шт
Светильник с уголком (3) .....	- 1
Винт М 4х8 .....	- 2
Шайба 4 .....	- 4
Шайба гровера 4 .....	- 2
Гайка-барашек М4 .....	- 2
Саморез 3,9х16.....	- 2
Этикетка АВЕ 303.000.000.1 ЭТ	

## 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**2.1** Зафиксировать **ЛЮКС** (рис.1), обеспечить оптимальное освещение рабочей зоны, на устойчивой (закрепленной) поверхности одним из следующих способов:

а) с помощью саморезов (из комплекта поставки) - к деревянным поверхностям толщиной от 12 мм;

б) с помощью винтов с гайками и шайбами (из комплекта поставки) – в отверстия на корпусе изделий (ПОЛИР, ФРМ, УЗР, Б, ВМУ),

в) с помощью винта на боковой стойке СЗТ 4.х МАСТЕР;

**2.2** Вставить вилку (5) сетевого шнура **ЛЮКС** в розетку ~220/230В 50/60Гц. Включение/выключение освещения – переключателем (4).

**2.3** После работы выключить переключатель и отключить **ЛЮКС** от сети.

## 3 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ЛЮКС** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ЛЮКС** не требуется.

## 4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантия не распространяется на светодиод.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

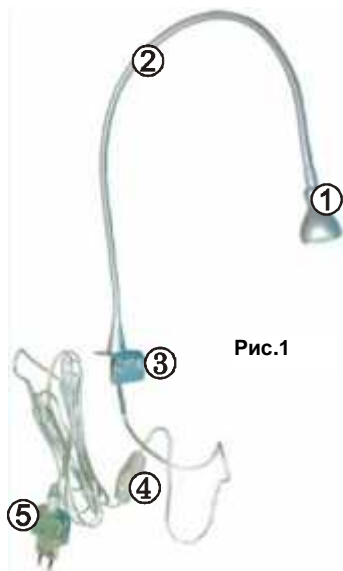


Рис.1